



Getinge Aquadis 56

Mosó-fertőtlenítő automaták

Hatékony áteresztőképesség, fenntartható teljesítmény

GETINGE *
AQUADIS | M



GETINGE *
AQUADIS | M



A sokoldalú mosó- fertőtlenítők,

amelyek a betegek és a
bolygó javát szolgálják

Válassza ki azt a nagy teljesítményű készüléket, amely megfelel hosszú távú fenntarthatósági céljainak.

A biztonság és a fenntarthatóság között nem lehet kompromisszum. A hatékony és sokoldalú Aquadis 56 mosó-fertőtlenítők hatékony tisztítást és nagy áteresztőképességet biztosítanak kis fizikai és környezeti lábnyom mellett.

A Getinge Aquadis 56 egy teljesen automatikus, közepes méretű mosó-fertőtlenítő, amely sokféle műszert és rakományt képes kezelni. Az egyedülálló kétszivattyús rendszer hatékonyan és eredményesen használja fel a vizet, minimalizálva a kórház közüzemi fogyasztását. Mint a Getinge portfolio többi modern mosó-fertőtlenítő és sterilizáló készüléke, ez is a Centric-et alkalmazza – az intuitív felhasználói felületet, amely leegyszerűsíti a folyamatokat és csökkenti a kezelői hibák lehetőségét.

Az Aquadis 56 mosó-fertőtlenítő mindezt kis fizikai lábnyomban éri el. A manuálisan lenyitható vagy automata tolóajtók növelik az Ön létesítményének rugalmasságát. A hatékony ciklusok és a nagy áteresztőképesség elősegíti a fertőtlenített tételek gyorsabb feldolgozását, lehetővé téve a kórházak, sebészeti központok és klinikák számára, hogy minimalizálják a késéseket a műszerkészletek használata között.

Bízzon a Getinge Aquadis 56 mosó-fertőtlenítőben, amely segít elérni a fertőzések megelőzésére vonatkozó hatékonysági és fenntarthatósági céljait.

Két modell maximalizálja a rugalmasságot

A Getinge Aquadis 56 mosó-fertőtlenítőket a funkcionalitás maximalizálására tervezték.

A Getinge Aquadis 56 két különböző modellben kapható: 56M manuális lehajtható ajtóval és 56A automatikus függőleges tolóajtóval. Az 56M lehajtható ajtaja a mosókocsi rakodófelületeként szolgál a sebészeti műszerek be- és kirakodásakor. Az átadós (kétajtós) modellnél a mosó-fertőtlenítőben lévő kamra visszaküldő kamraként is szolgál, hogy megkönnyítse az üres mosókocsi visszaküldését a szennyezett oldalra. Rakodókocsi a mosó-fertőtlenítő betöltéséhez nem szükséges, csak a különböző típusú mosókocsikra történő cserénél.

Ez azt jelenti, hogy a mosókocsi visszaküldése a mosó-fertőtlenítőn keresztül történik, így nincs szükség további rendszerre.

Az automata tolóajtós Aquadis 56 modellnél rakodókocsira van szükség a mosókocsi be- és kirakodásához. A termelékenység optimalizálása érdekében a legjobb gyakorlat a mosókocsik egyirányú áramlása. Ez azt jelenti, hogy egy átadós (kétajtós modell) megköveteli a mosókocsi külön visszaküldését az elválasztó fal szennyezett oldalára.



56M
Manuális ajtó



56A
Automatikus ajtó



- **Használhatóság:** A könnyen használható Centric felhasználói felület összhangban van más Getinge termékekkel a hibák csökkentése és a betanulási idő minimalizálása érdekében
- **Rugalmasság:** Válasszon egyajtós vagy átadós modelleket manuálisan lenyitható vagy automatikus tolóajtóval a helykihasználás javítása érdekében; kompatibilis szabványos tároló-, szállító- és rakodókocsikkal a gazdaságos folyamatáramlás biztosítása érdekében
- **Nagy teljesítményű tisztítás:** Kettős szivattyú technológia optimalizált víznyomást biztosít a kiváló tisztítás érdekében alacsony vízhasználat mellett
- **Hatékony szárítás:** A nagy hatékonyságú szárítók kevesebb energiát fogyasztanak, és csökkentik a teljes ciklusidőt
- **Környezetbarát jellemzők:**
 - A fordulatszám-szabályozás és a kettős keringtetésű szivattyúk hatékonyabban használják fel a vizet
 - A mosószer pontos adagolása és hígítása minimalizálja a hulladék mennyiségét



A kézi lenyitható ajtó be-/kirakodó platformként szolgál




Beépített zárható rekesz a tisztító vegyszerekhez

Funkcionális kialakítás


Intuitív és megbízható

Az Aquadis 56 mosó-fertőtlenítők innovatív, felhasználóbarát kijelző felülettel rendelkeznek. Az intuitív kialakítás a Getinge többi termékét tükrözi, kevesebb képzést igényel, és minden tapasztalati szinten könnyen kezelhető.


Programválasztás és hátralévő idő

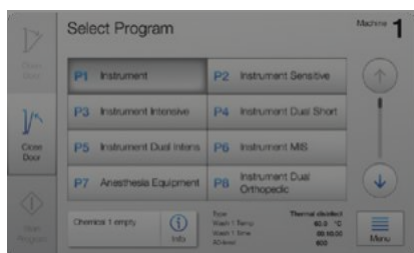

Az egyértelmű menüopciók megkönnyítik a megfelelő program kiválasztását.

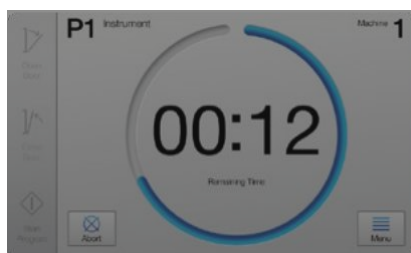


Állapot egy szempillantással: Könnyen leolvasható a hátralévő idő, még távolról is.

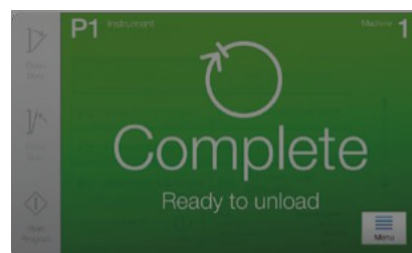


A felhasználói felület világos, rendezett információkat nyújt – csak azt, amire az adott szakaszban szüksége van, és semmi többet.

Állapot egy szempillantással

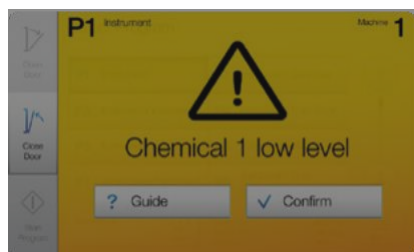

Világos, könnyen érthető sárga problémamegoldáshoz vagy a speciális funkciók eléréséhez, közvetlenül a felhasználói felületről.

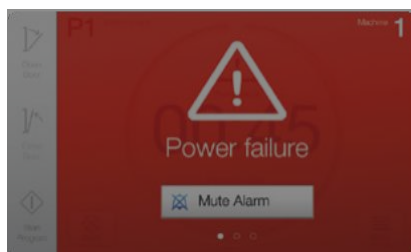

A hangos riasztásokat színekódolt vizuális figyelmeztetések kísérik, amelyek azonosítják a problémát és megoldásokat mutatnak be.

A nagy, 7 hüvelykes, nagy felbontású képernyők még távolról is könnyen leolvashatók és monitorozhatók (átadós modelleknél mindkét oldalon elérhető). Ezek a képernyők egyértelműen és logikusan jelenítik meg a legkritikusabb folyamatinformációkat, beleértve a hátralévő ciklusidőt és az indítási beállításokat.

A hatékonyság maximalizálása

Működési és környezeti hatékonyság egy készülékben

A kevesebb több

A Getinge-nél az Aquadis 56 mosó-fertőtlenítőket a „kevesebb több” mentalitással terveztük. Kevesebb energiát, vizet és mosószeret használnak fel, miközben hatékonyabban és eredményesebben tisztítják a műszereket és berendezéseket – így kevesebb pénzt költhet a termék életciklusa során.

- A fordulatszám-szabályozás és a kettős keringtetésű szivattyúk maximalizálják a hatékonyságot
- Javított töltési és ürítési sebesség a ciklusidő csökkentése és az áteresztőképesség növelése érdekében
- A hatékony szárítási folyamat csökkenti az időt
- Szabványos vagy gyorsfűtés (egy vagy kettős elektromos fűtés) a folyamatidő további csökkentése érdekében

Három szivattyúsebesség biztosítja, hogy az Aquadis 56 mosó-fertőtlenítő csak a szükséges mennyiséget használja:

Alacsony sebesség: Érzékeny program

Közepes sebesség: Standard program és a végső fertőtlenítő öblítés

Nagy sebesség: Intenzív program a leghatékonyabb tisztításért

Dinamikus víz- és mosószerhasználat

Nincs két rakománynak azonos víz- vagy mosószerigénye. Az Aquadis 56 mosó-fertőtlenítő dinamikusan igazodik, hogy minden rakományhoz a megfelelő mennyiséget használja.

- **Dinamikus vízfeltöltés:** Amikor a víz „csapdába esik” a rakományban, több víz kerül hozzáadásra; az Aquadis 56 automatikusan alkalmazkodik ezekhez a valós helyzetekhez, amikor azok megtörténnék.
- **Dinamikus mosószer adagolás:** A vízfelhasználás folyamatosan monitorozott, és mosószer hozzáadása történik, hogy biztosítható legyen a mosószer egyenletes és pontos hígítása túladagolás nélkül; a fogyasztási adatok minden folyamatjelentésben elérhetők, hogy a kezelők megértsék, hogyan változik rakományonként az energia- és mosószer-fogyasztás.



Ergonómiailag hatékony

Mosókocsik berakodása, tárolása, átszállítása

Berakodó kocsi

Az Aquadis berakodó kocsik mindegyik modellhez egyediek, és nem kompatibilisek mindkettővel.

Az 56A berakodó kocsikat úgy tervezték, hogy több kocsit is össze tudjanak „csatlakoztatni”, így átrakóasztalként is használhatók a be- és kirakodási oldalon a mosókocsik elhelyezésére. Ez lehetővé teszi, hogy kézi tároló- és rakodórendszerként használják őket. Kerekes kialakításúak, könnyen eltávolíthatók a megelőző karbantartás vagy a tisztítószertartályok cseréje során. Továbbá mindkét kocsi alkalmas a tárolóasztallal való használatra.



Be- / kirakodó kocsi 56A-val



Be- / kirakodó kocsi 56M-el

Tárolóasztalok

A tárolóasztalok a használaton kívüli mosókocsik és tárgyak tárolására szolgálnak. Az 56M és 56A rakodókocsikat úgy tervezték, hogy könnyen és biztonságosan vigyék át a mosókocsikat a tárolóasztalra. Minden tárolóasztal kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, könnyen tisztítható felülettel, és beépített biztonsági

mechanizmussal, amely megakadályozza a mosókocsi véletlen leesését. A tárolóasztalok nagyon rugalmasak, és párhuzamosan elhelyezhetők a falhoz, vagy egy vonalba helyezhetők, így transzfer asztalt hozhatnak létre.

Transzfer rendszer

Az Aquadis 56 tároló- és rakodótermékek kompatibilisek a Getinge 86-os sorozatú mosó-fertőtlenítők meglévő átadó tolóajtó- és kamrai termékeivel. Ezek könnyen illeszthetők a mosókocsi keskenyebb váltószélességű, elérhető adapterkészleteihez.

Átadó tolóajtó nyílással: A dokkolókészlet-adapter egyszerűen felszerelhető az Aquadis 56 betöltőrendszer termékeivel való tökéletes dokkolás érdekében. A tárolóasztal (kerekek nélkül) és a rakodókocsi kézi puffervisszavezető rendszerhez használható; egyszerűen helyezzen el egy sorba annyit, amennyi szükséges, hogy létrehozzon egy „szállítószalag” rendszert. Tárolóasztalok vagy rakodókocsik közül választhat a hely- és funkcionális igényeinek megfelelő „szállítószalag” rendszer kialakításához.

Átadó kamrával: Az átadó kamrában egy sinkészlet található, amely vezeti a kocsikat és lehetővé teszi a kisebb Aquadis 56 mosókocsik hatékony visszajuttatását. Tárolóasztalok vagy rakodókocsik közül választhat a hely- és funkcionális igényeinek megfelelő „szállítószalag” rendszer kialakításához.

Megjegyzés: Csak az 56A-s rakodókocsik (egy vagy több) használhatók a kirakodó oldalon az átadó kamra kialakítása miatt.



Maximális tisztítás

Nyomonkövethető teljesítmény

A tisztaság dokumentált igazolása

Az Ön Központi Sterilizálójának (KS) legjobb gyakorlatai a kórházi szerzett fertőzések elleni soha véget nem érő küzdelem első vonalában állnak. A sterilítási adatok hatékony dokumentálására és visszakereshetőségére való képesség biztosítékot jelent a szabályozó ügynökségek, akkreditációs szervezetek és az egyre jobban tájékozott közvélemény számára.

A valós idejű adatok értékes információforrást jelentenek a KS-menedzserek és a kórházi adminisztrátorok számára a problémák gyors orvoslásában, a gyártás-tervezés javításában és a megfelelés ellenőrzésében. A titkosított Getinge Online portálon igény szerint biztonságosan hozzáférhet a tisztítási adatokhoz. A Getinge Aquadis 56 mosó-fertőtlenítők integrálhatók a T-DOC-hoz, a mi steril készletkezelési megoldásunkkal is.

Valós idejű ciklusadatok rögzítése és tárolása

A Getinge Aquadis 56 mosó-fertőtlenítő készülékek valós idejű ciklusadatok rögzítésével és tárolásával kompatibilisek a T-DOC-al, a mi steril készletkezelési megoldásunkkal. Ez egy értékes információforrás a KS-menedzserek és a kórházi adminisztrátorok számára, amelyek segítenek gyorsan orvosolni a problémákat, javítani a gyártástervezést és ellenőrizni a megfelelést.



Megbízható teljesítmény, a tisztaság független igazolása

A Getinge Clean tisztító vegyszer termékeink hosszú évek óta maximális teljesítményt, valamint hatékony és gazdaságos termelékenységet biztosítanak.

A műszertisztító vegyszerek és karbantartó termékek átfogó kínálata a legmodernebb készítményeket tartalmazza a legnagyobb kihívást jelentő műszertisztítási akadályok kezelésére: előkezelés és összetett, minimálisan invazív műszerek számára.

Központi adagolórendszerünk, a Getinge Clean Management System (CMS) segítségével biztos lehet benne, hogy a megfelelő mennyiségű mosószert használja a mosó-fertőtlenítő gépekben, az ultrahangos tisztítóokban és a kézi tisztítóállomásokban.

A Getinge Assured mosás ellenőrzési termékek rutinszerű használata független ellenőrzést tesz lehetővé arról, hogy a tisztítási folyamat hatékony és konzisztens. A maradék-fehérje tesztek széles skáláját kínáljuk felületekre és műszerekre – beleértve az üreges lumeneket és az endoszkópokat.



A legnagyobb kapacitás a legkisebb helyigénnyel

A Getinge Aquadis 56 mosó-fertőtlenítő két modellben kapható, akár 12 DIN tálcás kapacitással.

	Mértékegység	56M	56A
Külső méretek			
Szélesség	mm	650	
Mélység	mm	690 mm	760 mm
Magasság*	mm	1950	
Belső méretek			
Mosósínek száma (akár)	db	6	
Kamratérfogat (bruttó)	liter	298	
Kamratérfogat (hasznos)	liter	229	
Kamra szélesség (hasznos)	mm	555	
Kamra mélység (hasznos)	mm	618	
Kamra magasság (hasznos)	mm	667	
DIN 1/1** tálcák/ rakomány	db	12	
SPRI I*** tálcák/ rakomány	db	10	

* = A gép elejének magassága a falba süllyesztett készülék esetén

** = DIN 1/1 = 480 x 250 x 50 mm

*** = SPRI I = 450 x 340 x 70 mm





Abban a szilárd meggyőződésben, hogy minden személynek és közösségnek hozzá kell férnie a lehető legjobb ellátáshoz, a Getinge olyan termékeket és megoldásokat kínál kórházak és élettudományi intézmények számára, amelyek célja a klinikai eredmények javítása és a munkafolyamatok optimalizálása. A kínálat tartalmaz termékeket és megoldásokat az intenzív ellátáshoz, a szív- és érrendszeri eljárásokhoz, a műtökhöz, a steril újrafeldolgozáshoz és az élettudományhoz. A Getinge több mint 10 000 embert foglalkoztat világszerte, és a termékeket több mint 135 országban értékesítik..

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy információkat nyújtson az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi közönség számára.

Getinge Infection Control AB · PO Box 69 · SE-305 05 Getinge · Svédország · +46 10 335 00 00 · info@getinge.com

www.getinge.com